

Produktheft/Gebrauchsanleitung

TRANSPORT BRACKET



TRANSPORT BRACKET

Die Tragehalterung TRANSPORT BRACKET ist für das Beatmungsgerät Medumat Transport der Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG in Verwendung mit der Wandhalteplatte Base Station Mini II (Fa. Weinmann) entwickelt worden

Wozu dient die ATOS TRANSPORT BRACKET®?

Das Tragesystem TRANSPORT BRACKET dient zur sicheren Verlastung des Beatmungsgerätes **Medumat Transport** der Firma Weinmann, sowie der benötigten Sauerstoffflasche und muss mit der Wandhaltestation (Wandhalteplatte) **Base Station Mini II** (Weinmann) im Rettungsfahrzeug verlastet werden.

Nachweise der positiv abgeschlossenen Prüfungen:



DIN EN 1789 (DEKRA 201024864)



Patentamt AUSTRIA (AM285/2011)

Pflegehinweise:

WICHTIGER HINWEIS:

Die Pflegehinweise beziehen sich **nur** auf die Transport Bracket. Für die Reinigung des Beatmungsgerätes Medumat Transport beachten Sie bitte die Hinweise des Herstellers Weinmann.

Das Tragesystem TRANSPORT BRACKET besteht aus pulverbeschichteten und gebogenem Aluminium mit abgerundeten Kanten.

Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel sollen einen pH-Wert zwischen 5-8 aufweisen.

Bei Abweichungen kann mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen werden.

Bei Anwendung von falschen Desinfektionsmitteln übernimmt der Hersteller keine Haftung über entstehende Schäden.



Zusammenbau der Gasversorgung:

WICHTIGER HINWEIS:

Im Tragesystem TRANSPORT BRACKET darf nur eine 2 Liter Sauerstoffflasche verlastet werden.

Zur Verwendung der gesamten Gasversorgung verweisen wir auf die Produkthinweise der Hersteller der Gaseinheit. (Sauerstoffflasche, Druckminderer, Modul Oxygen und Beatmungsgerät).

WICHTIGER HINWEIS:

Für den Zusammenbau der O₂ Einheit übernimmt der Hersteller der TRANSPORT BRACKET keine Haftung.




Modul Oxygen mit Winkeltülle zum direkten Sauerstoffanschluss eines O₂ Schlauches zum Patienten.

Wechseln der Sauerstoffflasche:

WICHTIGER HINWEIS:

Das Wechseln der O2 Flasche darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden und muss laut dem Herstellerangaben der Gasflasche und des Druckminderers durchgeführt werden. Der Hersteller der ATOS TRANSPORT BRACKET übernimmt hier keine Haftung.

1. Der Schließmechanismus der Schelle ist nur für eine 2 Liter O2 Flasche ausgelegt.
2. Bitte darauf achten, dass der Verschluss der Sauerstoffschelle richtig eingerastet ist (Pfeil).
3. Die Verschlusschnalle nach oben drücken (grüner Pfeil)

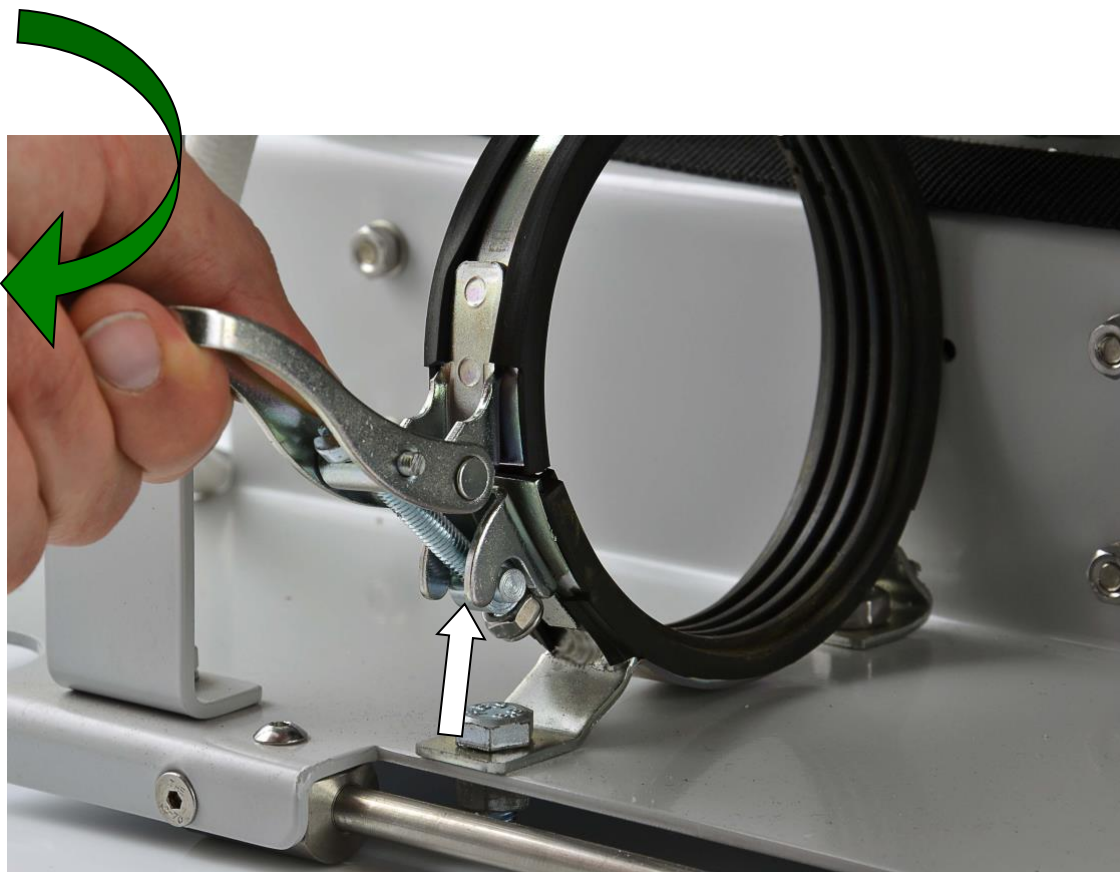

Tasche:

Der Beatmungsschlauch soll in der vorgesehenen Tasche verstaut werden.



Anmerkung:

Die Tasche kann mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gereinigt werden, welche einen pH-Wert zwischen 5-8 aufweisen müssen.

Bei Abweichungen kann mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen werden.



Verlasten der TRANSPORT BRACKET im Fahrzeug:


WICHTIGER HINWEIS:

Im Fahrzeug darf die Tragehalterung ausschließlich nur mit der Wandhalteplatte Haltestation Base Station Mini II (WM 8164) der Firma Weinmann verlastet werden.



Base Station Mini II (WM8164)

Dabei ist zu beachten, dass der Bolzen der Haltestation Base Station Mini richtig einrastet. (Pfeil)

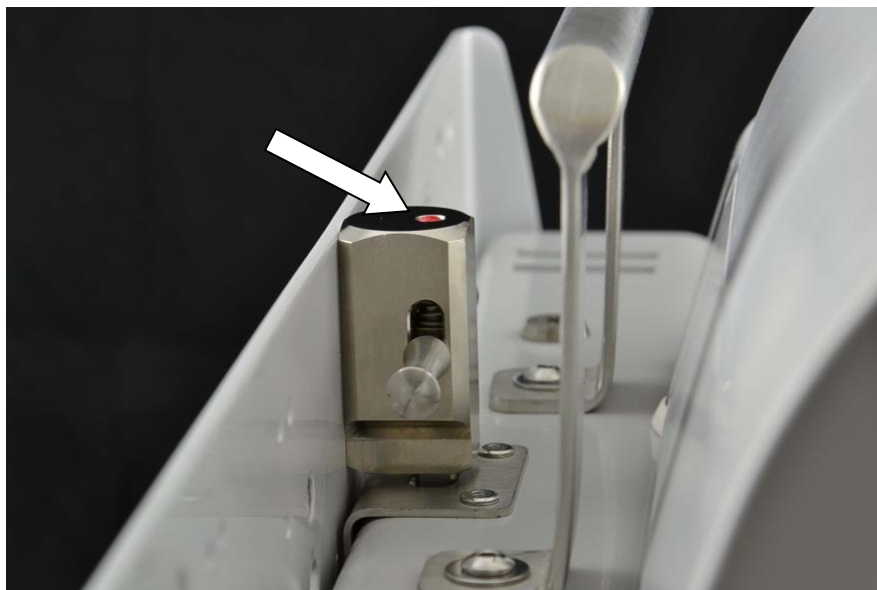

Allgemeine Hinweise:

Das Tragesystem darf nur mit folgenden Produkten bestückt werden. Bei Änderungen der Komponenten muss mit dem Hersteller Rücksprache gehalten werden.

- Beatmungsgerät Medumat Transport der Firma Weinmann
- 2 Liter O2 Flasche
- Modul Oxygen der Firma Weinmann
- Verstautasche für den Beatmungsschlauch
- Tragegriff der Firma ATOS Medical Solution

Das Beatmungsgerät ist mit Gummiabstandsplatten zur Schwingabsorption auf dem Tragesystem mit M4 Schrauben (Edelstahl Niro A2) verschraubt, welche mit einer Schraubensicherung versehen sind.

WICHTIGER HINWEIS:

Ein Wechseln des Beatmungsgerätes darf nur von fachkundigem Personal erfolgen.

Im Fall einer Fremdwartung bzw. Montage übernimmt der Hersteller ATOS Medical Solution keine Haftung.

Wartungsintervall:

Die TRANSPORT BRACKET muss alle 12 Monate durch den Hersteller einer Überprüfung unterzogen werden. (STK)



Die TRANSPORT BRACKET ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 im Sinne der Europäischen Medical Device Directive (MDD) 93/42/EWG



Nähere Informationen direkt beim Hersteller:

ATOS AMBULANZ MOBILE
Bereich: MEDICAL SOLUTION
Unterkriech 34
A-4845 Rutzenmoos/Regau

Ihre Ansprechpartner:

Geschäftsbereichsleitung, Entwicklung, Verkauf:

Michael Schiemer
Handy: 0664/333 97 23
office@atos-ambulanz.at

Produktion, Ersatzteile, Reklamation:

Stefan Schiemer
ersatzteile@atos-ambulanz.at

Tel: 07672/222 33
Fax: 07672/222 33 44
www.atos-ambulanz.at

Firmeninformation

ATOS AMBULANZ MOBILE ist ein Teilbereich der ATOS GROUP GMBH (AUSTRIA)