

# Produktheft/Gebrauchsanleitung

## **ATOS MP Auflage mit Anti Deku Auflage** *Typ KRAL®*

**Abmessungen 1860x500x60**



## **MP Auflage mit Anti Deku Auflage/Funktion**

Die Auflage dient als Zwischenpolsterung von bestehenden Patiententransportliegen und Patienten.

Die Auflage ist mit einem speziellen ANTI DEKU AUFLAGENSCHAUM und einem speziellen Bezug ausgestattet. Dadurch wird ermöglicht, dass der Patient eine komfortable Lagerung erhalten kann.

Es wird empfohlen, dass die MP Auflage mit einem zusätzlichen Leintuch verwendet wird.

Patienten dürfen hier nicht mit spitzen Gegenständen (zum Beispiel Schlüsseln in Hosen) gelagert werden, da es dadurch zu Schäden am Bezug kommen kann.

**CAVE: Diese Auflage ersetzt nicht den regelmäßigen Lagerungswechsel von Patienten**

## Materialien

### Schaumstoff

Der verwendete Schaumstoff im inneren der Auflage ist eine speziell entwickelte und zusammenstellte Schaumstoffkomponente und trägt die internen Bezeichsartikeln N4050 und V5020. Diese erfüllen die gängigen Normen EN1021-1, ÖKO-TEX Standard 100 sowie CertiPur Standard.

### Bezug unten

Der untere graue Bezug der Auflage ist mit einem rutschhemmenden Material ausgestattet und trägt die interne Artikelbezeichnung „*Antislip*“. Dieser ist vollflächig mit dem anderen Bezug vernäht.

Dieser Bezug zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Rutschfest
- Antistatisch
- Hochelastisch
- Flüssigkeitsdicht
- Hohe Atmungsaktivität
- Keimdicht gegen Bakterien, Viren und Pilze
- Blut-, sekret- und urindicht
- Latex- und phthalatfrei
- Für Allergiker geeignet

Dieser dient zu einer stabilerer Haftung an Patiententransportliegen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass beim Lagerungsvorgang die Auflage verrutschen kann. In solchen Fällen übernimmt der Hersteller keine Haftung.



**Abbildung 1: untere Seite der MP Auflage mit rutschhemmender grauer Oberfläche**

## Bezug oben und seitlich

Der obere Bezug besteht aus einem schwarzen Kunststoffbezug und trägt die interne Artikelbezeichnung „*Antistatisch*“ und ist vollständig mit dem unteren Bezug vernäht. Dieser Bezug zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Antistatisch
- Hochelastisch
- Flüssigkeitsdicht
- Hohe Atmungsaktivität
- Keimdicht gegen Bakterien, Viren und Pilze
- Blut-, sekret- und urindicht
- Latex- und phthalatfrei
- Für Allergiker geeignet

Durch die glatte Oberfläche ist ein leichter Patiententransfer möglich.



**Abbildung 2: Patientenoberseite, Farbe schwarz**

## Reinigung

Die MP Auflage kann mit handelsüblichen Desinfektionsmittel gereinigt werden. (pH Wert 5-8). Grundsätzlich soll auf allgemeine Verschmutzungen und Schäden geachtet werden.



## Service, Nutzungshinweis, Überprüfung bzw. Wartungsintervalle

Die MP Auflage unterliegt nicht dem **Medizin Produkte Gesetz**. Es ist daher keine regelmäßige Überprüfung und Wartung notwendig.

Die MP Auflage ist nur im intakten Zustand benutzbar. Diese ist daher auf Schäden durch laufende Sichtkontrollen zu überprüfen. Sollten Risse oder offene Stellen ersichtlich sein, so wäre eine Reparatur durch den Hersteller notwendig, damit die MP Auflage die hygienischen Standards entspricht.

Für die Entsorgung einer defekten MP Auflage übernimmt der Hersteller keine Kosten. Hier ist auf eine ordentliche und sachgemäße Entsorgung zu achten.

Die MP Auflage ist eine Eigenentwicklung der Firma ATOS GROUP GmbH.



Nähere Informationen direkt beim Hersteller:

**ATOS Group GmbH**  
**Bereich: Ambulanz Mobile mit Bereich Medical Solution**  
Am Unterfeld 9  
A-4844 Rutzenmoos/Regau

**Ihre Ansprechpartner:**  
Michael Schiemer, Geschäftsführung  
Handy: 0664/333 97 23  
Festnetz: 07672/222 33 44  
Fax: 07672/222 33 44  
office@atos-ambulanz.at  
www.atos-ambulanz.at